

SM 2 Universal

**Für die Applikation
von Händedesinfektionsmitteln, Wasch-
und Pflegelotionen**



- Passend für Flaschen von 450 ml bis 1.000 ml
- Verstellbarer Dosierhub von ca. 1 ml - 3 ml
- Herausnehmbare Pumpe
- Formschöner, robuster Kunststoffspender
- Betätigungshebel für Arm oder Ellenbogen
- Ständige Füllstandskontrolle möglich
- Erfüllt die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung
- Einfache Montage

Präparate-Spender SM 2 Universal

S&M

Schülke & Mayr

Beschreibung

Einfache und exakte Dosierung von Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotionen.

- Dosiert die benötigten Präparatemengen durch den verstellbaren Dosierhub in Mengen von ca. 1 ml bis ca. 3 ml je Hub.
- Pumpsystem und Auslaufventil sind aufeinander abgestimmt und berücksichtigen die unterschiedlichen Viskositäten der Präparate.
- Kein Nachtropfen, kein Auslaufen, kein Eintrocknen.

Auslaufventil

Das Auslaufventil ist so konzipiert, dass erst bei Freigabe der großen Öffnung das Produkt ausfließt. Hierdurch wird ein scharfer Strahl vermieden, der spritzt. Die zusätzliche Dichtung am untersten Ende der Auslauföffnung verhindert ein Tropfen am geschlossenen Ventil.

Füllstandskontrolle

Durch den transparenten Flaschenkörper jederzeit möglich.

Betätigungshebel

Kann per Ellenbogen oder Unterarm betätigt werden. Der Hebel lässt sich nach oben klappen zum einfachen Austausch der Pumpe und zur Dosiereinstellung.

Produktwechsel

Beim Produktwechsel ist nur die Einwegflasche auszutauschen und das einfach herausnehmbare Pumpsystem durchzuspülen. Das Flaschenetikett ist gleichzeitig Spenderetikett.

Montagehinweise

Standardbefestigung:

- 2 Langlöcher oben und ein Langloch unten.
- Beste statische Befestigung für Präparate-Spender: Durch T-Anordnung passend in allen Kachelfugen.
- Lochbild in der Gehäuserückwand ist für alle gängigen Spenderbefestigungen geeignet.


Art.-Nr.: 668 500

Zubehör


- Schalenhalter SM 2 Universal - Art.-Nr. 668501
- Schale für Schalenhalter - Art.-Nr. 669301
- Klammer für Schalenhalter - Art.-Nr. 669302

Technische Daten

Präparatebehälter:	450 ml bis 1.000 ml
Dosierung verstellbar:	ca. 1 ml bis ca. 3 ml
Füllstandskontrolle:	ständig durch transparenten Behälter
Werkstoffe:	Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Metallteile aus Edelstahl
Breite:	104 mm
Tiefe:	210 mm (mit Armhebel)
Höhe:	300 mm

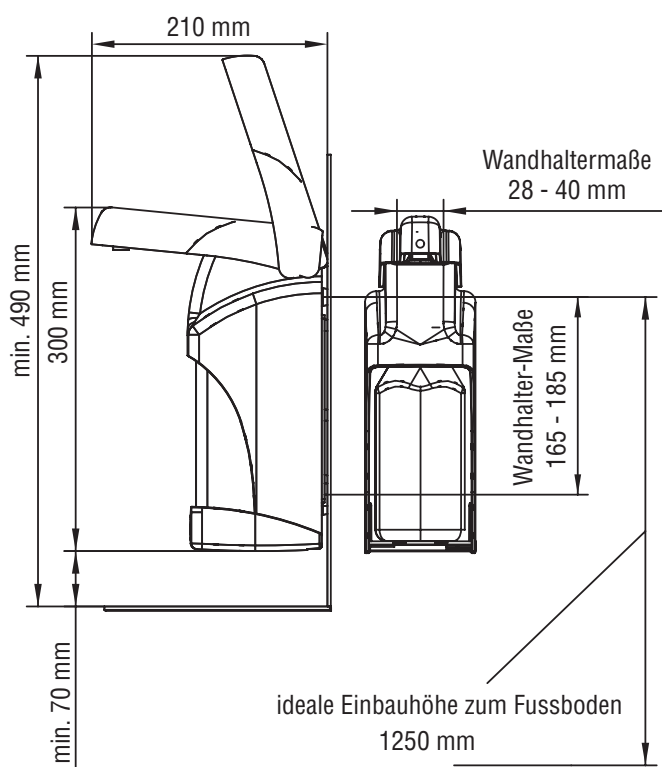

Zubehör: Schalenhalter

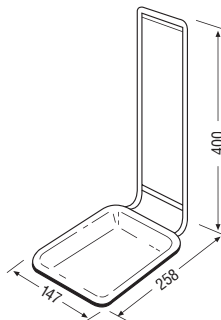

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt
Telefon 040 / 521 00-0
Telefax 040 / 521 00-318
mail@schuelke-mayr.com

Kundenbetreuung und Verkauf
Durchwahl: -214 / Fax: -228

Service-Technik
Durchwahl: -261 / -269 / Fax: -228

Schülke & Mayr AG
Obere Zäune 12
CH-8001 Zürich
Telefon (01) 252 98 02
Telefax (01) 252 98 27
mail.ch@schuelke-mayr.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Zieglergasse 8
A-1070 Wien
Telefon (1) 523 25 01
Telefax (1) 523 90 35 79
office@schuelke-mayr.at